





RACCOMANDAZIONE PER L'APPLICAZIONE


La sequenza corretta di applicazione di Obsidian® ASG è illustrata nei punti riportati sotto.

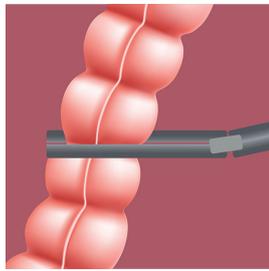


**PUNTO 1**  
Resezione del colon mediante suturatrice meccanica o altra procedura chirurgica standard.

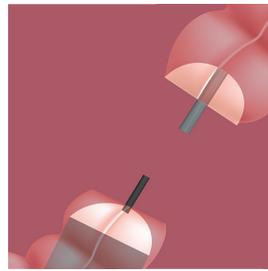


**PUNTO 2**  
Una volta posizionata con successo l'incudine e inserita la suturatrice circolare, collegare le due parti.

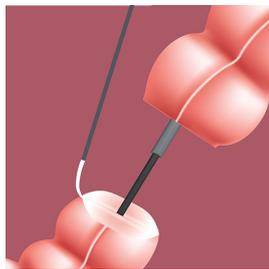


**PUNTO 3**  
Verificare la posizione del colon prossimale e applicare almeno 2 ml di Obsidian® ASG sull'intera superficie del moncone distale del colon.  
**Importante:** Soprattutto i margini esterni devono essere completamente coperti.

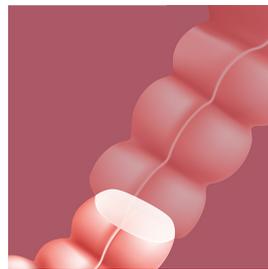


**PUNTO 4**  
La suturatrice viene chiusa e azionata in base alle linee guida del produttore, quindi ritratta per via transanale.

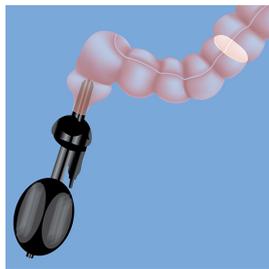


**PUNTO 5**  
Si controlla l'impermeabilità all'aria dell'anastomosi mediante "test della bolla - acqua e aria" o mediante esame con agente di contrasto.

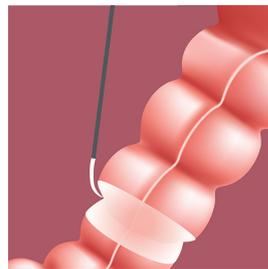

**PUNTO 6**  
Dopo evacuazione dell'NaCl e adeguata visualizzazione dell'area anastomotica, rinforzare l'anastomosi lungo tutta la circonferenza applicando Obsidian® ASG a 1,5 cm distalmente e 1,5 cm prossimalmente.

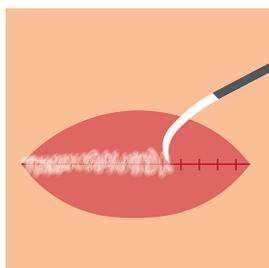

**PUNTO 7**  
Dopo la chiusura fasciale della linea mediana addominale nelle procedure laparoscopiche o dell'intera incisione chirurgica nelle procedure aperte, applicare la restante quantità di Obsidian® ASG direttamente sopra la chiusura fasciale.

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

**PUNTO 8**  
Chiusura finale della ferita.

**Nota:** Una volta terminata l'applicazione di Obsidian® ASG, attendere circa 30 secondi prima di continuare le manovre chirurgiche per ottenere la completa polimerizzazione di Obsidian® ASG.

