





## ANVÄNDNINGSGUIDE

I de olika stegen nedan visas rätt sekvens för applicering av Obsidian® ASG.

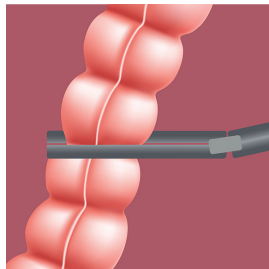


### STEG 1

Kolonresektion med stapler eller genom annan kirurgisk standardprocedur.

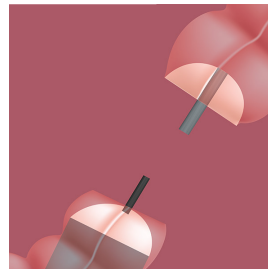

### STEG 2


När du lyckats placera städet och sätta in den cirkulära staplern kan du koppla ihop de två delarna.

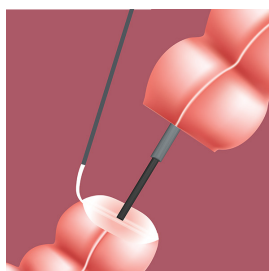

### STEG 3


Kontrollera läget för den proximala delen av kolon och applicera minst 2 ml Obsidian® ASG över hela ytan på den distala kolonstumpen.

**Viktigt:** Särskilt de yttre kanterna måste täckas helt.

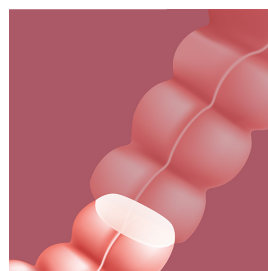


### STEG 4

Staplern stängs och avfyras enligt tillverkarens riktlinjer och dras försiktigt tillbaka transanalt.

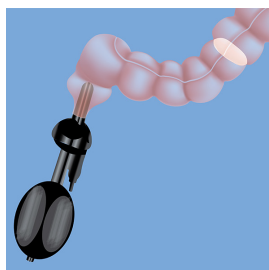


### STEG 5

Anastomosens lufttätthet kontrolleras genom "bubbeltest – vatten och luft" eller genom ett test med kontrastmedel.

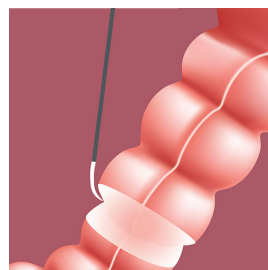


### STEG 6

Efter NaCl-evakuering och adekvat visualisering av anastomosområdet ska du förstärka anastomosens hela omkrets genom att applicera Obsidian® ASG 1,5 cm distalt och 1,5 cm proximalt.

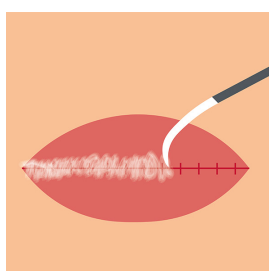

### STEG 7

Efter fasciärförslutning av bukens mittlinje vid laparoskopiska ingrepp eller hela det kirurgiska snittet vid öppna ingrepp, applicera den återstående Obsidian® ASG direkt ovanpå fasciärförslutningen.

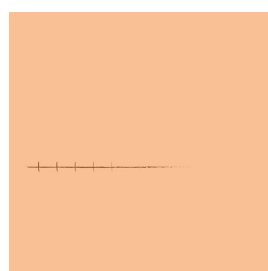

### STEG 8

Slutlig sårförslutning.

**Obs:** Efter avslutad applicering av Obsidian® ASG ska du vänta ungefär 30 sekunder innan du fortsätter kirurgiska manövrer tills polymeriseringsprocessen av Obsidian® ASG är slutförd.

