



APPLIKATIONS ANBEFALING

DEL 1: Klargøring af fistelgangen

Setontråd bør være lagt 4-6 uger før operationen

1. Afdæk fistelgangen(e)
2. Isæt fistelbørste. Rengør og debrider fistelgangen(e) med en frem-og-tilbage bevægelse (20 gange), og fjern ikke-vaskulariseret væv
3. Skyl fistelgangen(e) med en saltvandopløsning (37°C)
4. Gentag debriderings- og skyllecyklus (trin 2 og 3) ved behov.
Vigtigt: ens fistelbørsten grundigt mellem debrideringerne
5. Anvend en Z-sutur eller alternativt en mukøs lap
6. Udfør en cavatest for at kontrollere stivheden og modstandsdygtigheden af sutureringen af den indre os.

Procedure:

1. Anvend n Z-sutur
2. Stram suturen uden at lukke den helt
3. Skyl området med en saltvandsopløsning fra den ydre os med et passende tryk
4. Sørg for, at der ikke lækker væske fra den indre os, og at suturen er tilstrækkelig stram
5. Løsn Z-suturen, indfør applikatorenheden, og påfør Obsidian® RFT (se DEL 2).


Levator ani muskel

Puborectalis muskel

Intern anal-sfinkter

Ekstern anal-sfinkter

Extrasfinkterisk fistel

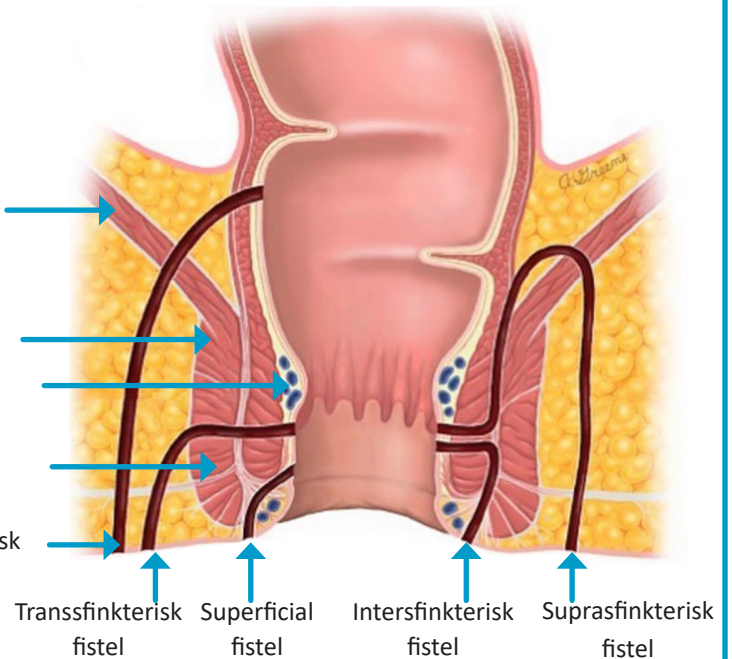

DEL 2: Anvendelse af Obsidian® RFT

1. Indfør Obsidian® RFT endoskopisk kateter fra fistelens distale ydre åbning til den intraluminal, proksimale indre fistelåbning
2. Påfør hele tiden Obsidian® RFT med indstillingen "JET UDEN LUFT", mens kateteret langsomt trækkes tilbage. Alternativt kan der påføres 1-5 ml af et andet stof samtidigt med Obsidian® RFT (f.eks. antibiotika)
3. Luk den indre fistelåbning med en sutur eller en mukøs lap
4. Alternativt kan den resterende Obsidian® RFT indsprøjtes rundt om fistlens indre åbning
5. Den eksterne fistelåbning forbliver åben
6. Dæk med en ikke-klæbende forbindelse

Behandling med Obsidian® RFT kan gentages så fistlen/fistlerne heler helt

