



RACCOMANDAZIONE PER L'APPLICAZIONE


PARTE 1: PARTE 1: Preparazione del tratto di fistola

Il drenaggio deve essere posizionato 4-6 settimane prima della procedura chirurgica

1. Esporre il/i tratto/i di fistola
2. Inserire lo spazzolino per fistola. Pulire e sbrigliare il/i tratto/i di fistola con un movimento va e vieni (x20) rimuovendo il tessuto non vascolarizzato.
3. Irrigare il/i tratto/i di fistola con soluzione fisiologica (37°C).
4. Ripetere il ciclo di sbrigliamento e irrigazione (punti 2 e 3) secondo necessità.
Importante: Pulire accuratamente lo spazzolino per fistola tra un'operazione di sbrigliamento e l'altra.
5. Applicare a discrezione una sutura a Z o un lembo di mucosa.
6. Eseguire il Cava Test per verificare la rigidità e la resistenza della sutura dell'os interno.

Procedura:

1. Applicare una sutura a Z
2. Stringere la sutura senza chiuderla completamente
3. Irrigare l'area con una soluzione fisiologica dall'os esterno a una pressione adeguata
4. Assicurarsi che non vi siano fuoriuscite di liquido dall'os interno e che la sutura sia sufficientemente stretta
5. Allentare la sutura a Z e inserire il dispositivo applicatore per applicare Obsidian® RFT (v. Parte 2)

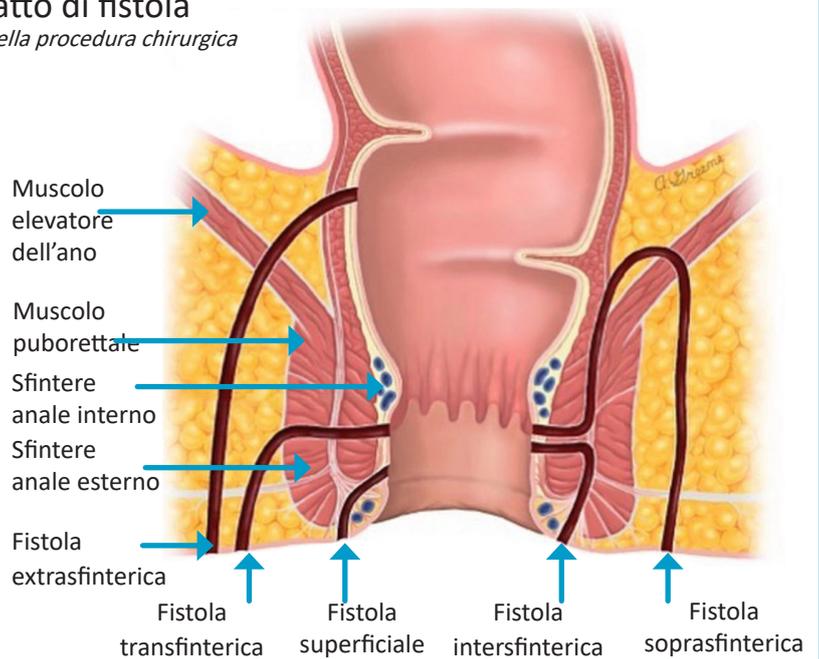

PARTE 2: : Applicazione di Obsidian® RFT

1. Inserire il catetere endoscopico Obsidian® RFT dall'apertura esterna distale della fistola verso l'ostio interno della fistola prossimale intraluminale
2. Applicare Obsidian® RFT in maniera costante e nel contempo ritrarre lentamente il catetere utilizzando l'impostazione di applicazione "GETTO SENZA ARIA". A discrezione si possono somministrare 1-5 ml di una seconda sostanza (per es. antibiotico) insieme a Obsidian® RFT
3. Chiudere l'apertura interna della fistola mediante sutura o lembo di mucosa
4. A discrezione, iniettare la restante quantità di Obsidian® RFT attorno all'ostio interno della fistola
5. L'ostio esterno della fistola rimane aperto
6. Coprire con una medicazione non aderente

Il trattamento con Obsidian® RFT può essere ripetuto fino a guarigione completa della/e fistola/e

