



APPLICATIEADVIES

DEEL 1: Voorbereiding van het fistelkanaal

Een seton moet 4-6 weken voor de chirurgische ingreep zijn geplaatst

1. Leg het fistelkanaal/de fistelkanalen bloot
2. Breng de fistelborstel in. Reinig en debrideer het fistelkanaal/de fistelkanalen met een heen-en-weergaande beweging (x20) en verwijder niet-gevasculariseerd weefsel
3. Spoel het fistelkanaal/de fistelkanalen met zoutoplossing (37°C)
4. Herhaal de debridement- en spoelcyclus (stap 2 en 3) indien nodig.
Belangrijk: Reinig de fistelborstel grondig tussen debridementen
5. Breng een Z-hechting of optioneel een slijmvliesflap aan
6. Voer een Cava Test uit om de stijfheid en resistentie van de hechting van de interne opening te controleren.

Procedure:

1. Breng een Z-hechting aan
2. Trek de hechting aan zonder deze volledig te sluiten
3. Irrigeer het gebied door met de juiste druk een zoutoplossing aan te brengen vanuit de externe opening
4. Zorg ervoor dat er geen vloeistof uit de interne opening lekt en dat het hechting strak genoeg zit
5. Maak de Z-hechting los en breng de applicator in om Obsidian® RFT aan te brengen (zie DEEL 2).

Musculus
levator ani

Musculus
puborectalis
Interne anale
sfincter
Externe anale
sfincter


Extrasfincterische
fistel

Transsfincterische
fistel

Oppervlakkige
fistel

Intersfincterische
fistel

Suprasfincterisch
fistel

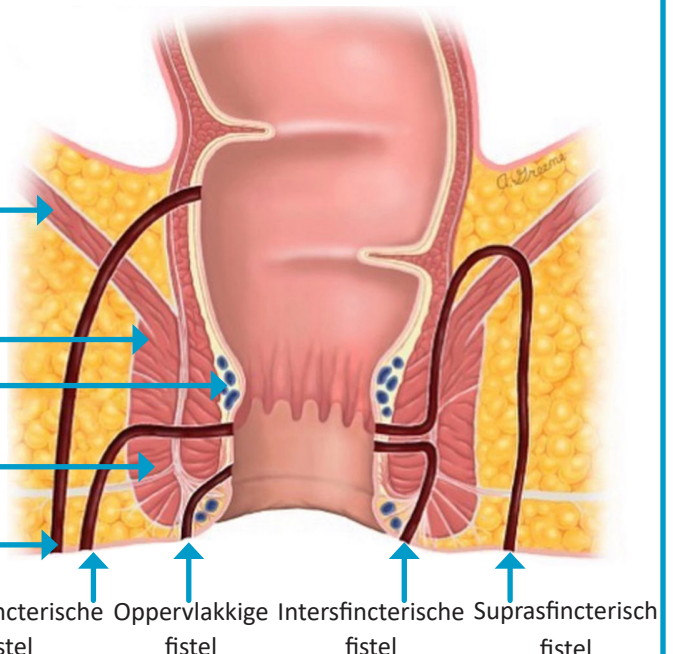

DEEL 2: Aanbrengen van Obsidian® RFT

1. Plaats de Obsidian® RFT endoscopische katheter vanuit de distale externe opening van de fistel naar de intraluminale proximale interne fistelopening
2. Breng Obsidian® RFT constant aan, terwijl u de katheter langzaam terugtrekt met de applicatie-instelling "JET GEEN LUCHT".
Optioneel kan een tweede substantie van 1-5 ml samen met Obsidian® RFT worden toegediend (bijv. antibiotica)
3. Sluit de interne fistelopening met een hechting of slijmvliesflap
4. Injecteer optioneel de resterende Obsidian® RFT rond de interne fistelopening
5. De externe fistelopening blijft open
6. Afdekken met niet-klevend wondverband

Behandeling met Obsidian® RFT kan worden herhaald voor volledige genezing van de fistel(s)

