



ANVÄNDNINGSGUIDE

DEL 1: Förberedelse av fistelkanalen

Setontråden ska vara på plats 4–6 veckor före det kirurgiska ingreppet

1. Frilägg fistelkanalen/-kanalerna
2. Sätt in en fistelborste. Rengör och debridera fistelkanalen/-kanalerna med en fram- och tillbakagående rörelse (x20) och ta bort icke-vaskulariserad vävnad
3. Spola fistelkanalen (-kanalerna) med koksaltlösning (37°C)
4. Upprepade debridering och sköljning (steg 2 och 3) vid behov.

Viktigt: Rengör fistelborsten noggrant mellan debrideringarna

5. Applicera en Z-sutur eller eventuellt en mukosaflik
6. Utför Cava-testet för att kontrollera stelheten och motståndskraften hos suturen av den inre öppningen.

Förfarande:

1. Applicera en Z-sutur
2. Dra åt suturen utan att stänga den helt och hållet
3. Spola området genom att applicera en koksaltlösning från den yttre öppningen med lämpligt tryck
4. Kontrollera att det inte läcker någon vätska från den inre öppningen och att suturen är tillräckligt tät
5. Lossa Z-suturen och sätt in applikatorenheten för att applicera Obsidian® RFT (se DEL 2)

Musculus levator ani

Musculus puborectalis

Inre analfinkter

Yttre analfinkter


Extrasfinkterisk fistel

Transsfinkterisk fistel

Yttlig fistel

Intersfinkterisk fistel

Suprasfinkterisk fistel

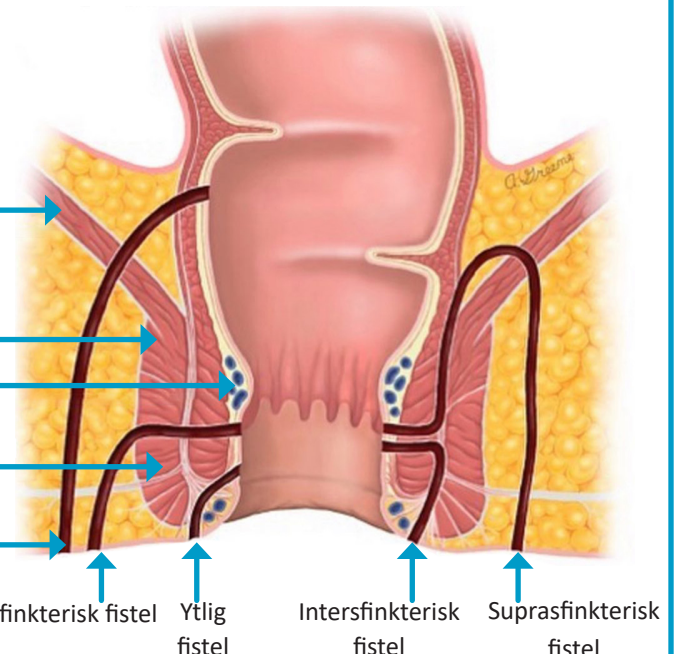

DEL 2: Applicering av Obsidian® RFT

1. För in den endoskopiska Obsidian® RFT -katetern från fistelns distala yttre öppning till den intraluminala proximala inre fistelmynningen
2. Applicera Obsidian® RFT konstant samtidigt som katetern långsamt dras tillbaka med hjälp av appliceringssinställningen "STRÅLE UTAN LUFT". Eventuellt kan en andra substans på 1–5 ml levereras tillsammans med Obsidian® RFT (t.ex. antibiotika)
3. Stäng den inre fistelöppningen med en sutur eller med en mukosaflik
4. Injicera eventuellt resterande Obsidian® RFT runt fistelns inre mynning
5. Den yttre fistelmynningen förblir öppen
6. Täck över med ett icke-häftande sårförband

Behandlingen med Obsidian® RFT kan upprepas för att få en fullständig läkning av fisteln (fistlarna)

